


ANEXO ÚNICO

ORIENTAÇÕES PARA **O USO DE TERMÔMETRO DIGITAL PARA AUTOAFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL**


PARTES DO TERMÔMETRO

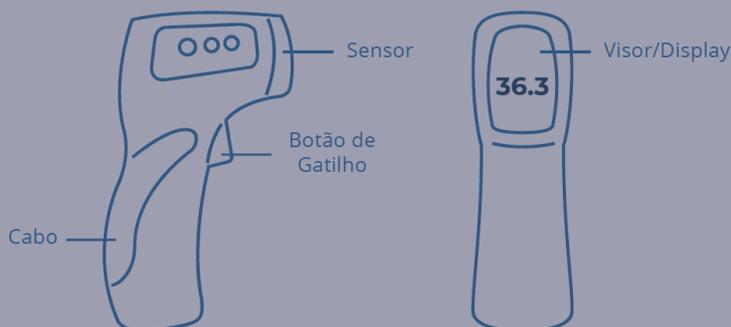

O ingressante deverá higienizar suas mãos com álcool 70% antes e após utilizar o termômetro.



Segure o termômetro pelo cabo sem apertar o botão de gatilho

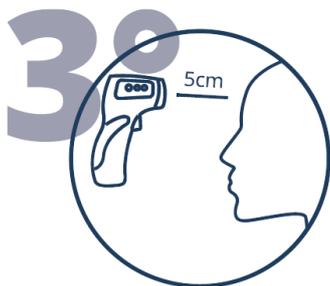

Aponte o sensor do aparelho para o centro da testa a uma distância de aproximadamente 5cm. Pressione (aperte) o botão de gatilho e mantenha pressionando até ouvir o sinal sonoro.



Exibir o visor com a aferição da temperatura